

Условия утилизации:

Орtez утилизируют с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. FG-100, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01699 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИИММАШ».

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмБХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Претензии принимает представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.



Инструкция по применению
ортопедических изделий



Ортез на пястно-фаланговый
сустав
FG-100

Stabil Line



Арт.: INTOC-FG-100-N1_06/15

Область применения:

Фаланги пальцев кисти. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Пластиковая шина на палец Orlett FG-100 обеспечивает надежную фиксацию межфаланговых суставов пальцев кисти. Фиксация обеспечивается застежками «велкро». Шина на палец рентген-негативна, обеспечивает высокий комфорт в процессе лечения за счет своего малого веса и современных материалов. В процессе эксплуатации ортез не теряет своего внешнего вида и легок в повседневном уходе.

Показания к применению:

- переломы, ушибы и прочие травмы пальцев кисти;
- вывихи суставов пальцев кисти;
- реабилитация после оперативных вмешательств на суставах пальцев кисти;
- растяжение связок пальцев кисти.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения изделия Orlett назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза;
- индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться с врачом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

Конструкция ортеза Orlett, арт. FG-100:

Ортез состоит из пластиковой шины и застежек-липучек «велкро» для фиксации шины.

Порядок надевания:

Надеть на поврежденный палец, зафиксировать застежками-липучками «велкро».

Порядок подбора размера:

Подбор размера проводится в соответствии с длиной пальца руки, измеренной от проекции суставной щели пястно-фалангового сустава до кончика пальца. В зависимости от строения пальцев, характера травмы (заболевания), вида лечения может потребоваться индивидуальный подбор размера, отличный от рекомендованных. Точный размер ортеза определяет врач в соответствии с указанной длиной ортеза.

Таблица подбора размеров:

Ортез на пястно-фаланговый сустав Orlett, арт. FG-100		
Размер	Длина пальца (см)	Длина ортеза (см)
S	4,5-5,5	4,9
M	5,5-6,5	6,2
L	6,5-7,5	7,4
XL	7,5-9,0	8,7

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Правила ухода:

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Состав изделия:

22% полиамид, 64% полиэтилен, 14% этиленвинилацетат.

Условия хранения:

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.